


# OLSEN TEC

www.olsen.odo.br



Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Arruela de Fixação da Cadeira ao Chão

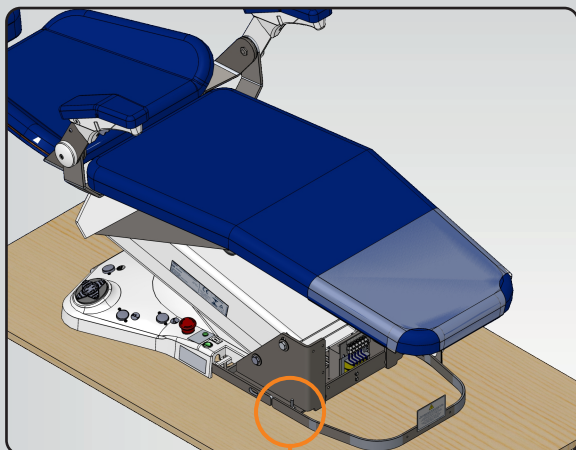

Informamos que ao desembalar a cadeira e desafixá-la da base de madeira, a "Arruela Lisa 1/4 ZB (cód. 5201004) deve ser guardada para ser reutilizada na fixação da cadeira ao piso do consultório, em conjunto com o "Parafuso Sextavado 1/4x60 (cód. 5200519)".

Informamos ainda que a fixação da cadeira ao piso é obrigatória para garantir a estabilidade e diminuir a vibração.

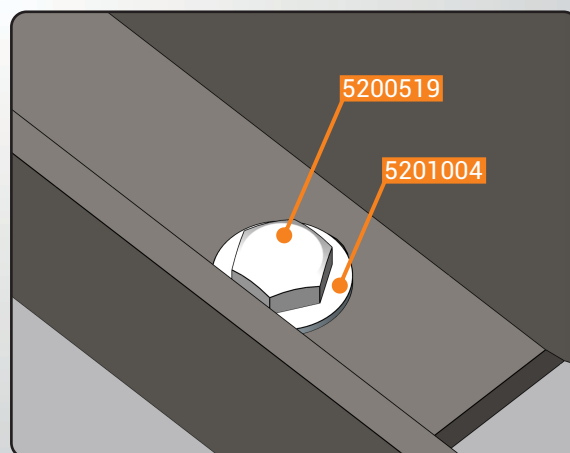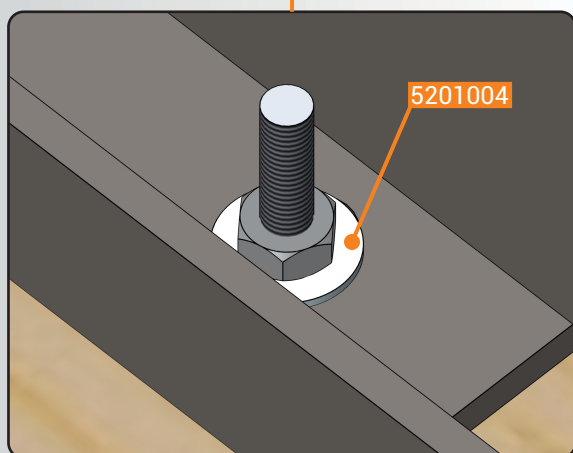

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**

Revisão 00 - 11 de Junho de 2021