




TROCA DE CONECTOR DO REFLETOR EVOLUTION PLUS

Prezado técnico,
Informamos que desde o dia 23/11/2021, o conector Sindal utilizado na conexão elétrica do refletor Evolution Plus foi substituído por conector Mini Fit, com a finalidade de facilitar a troca em campo. Além disso, foram acrescentadas as conexões Mini Fit ao chicote elétrico do refletor.


Obsoleto

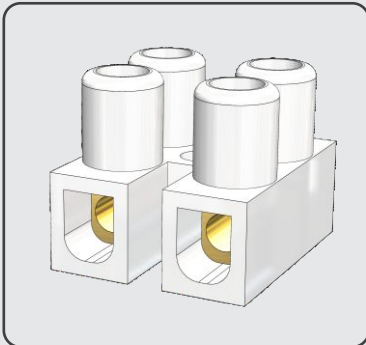

8302777
Conector Sindal


→

Novo

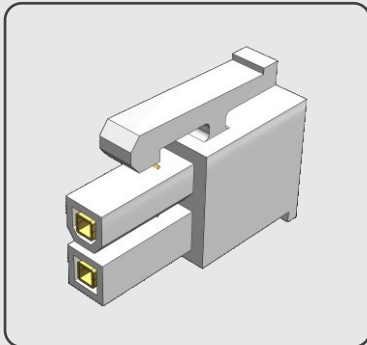


2200708
Conector Mini Fit


+

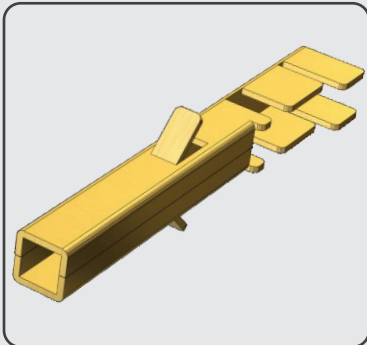

2200390
Terminal de Conexão

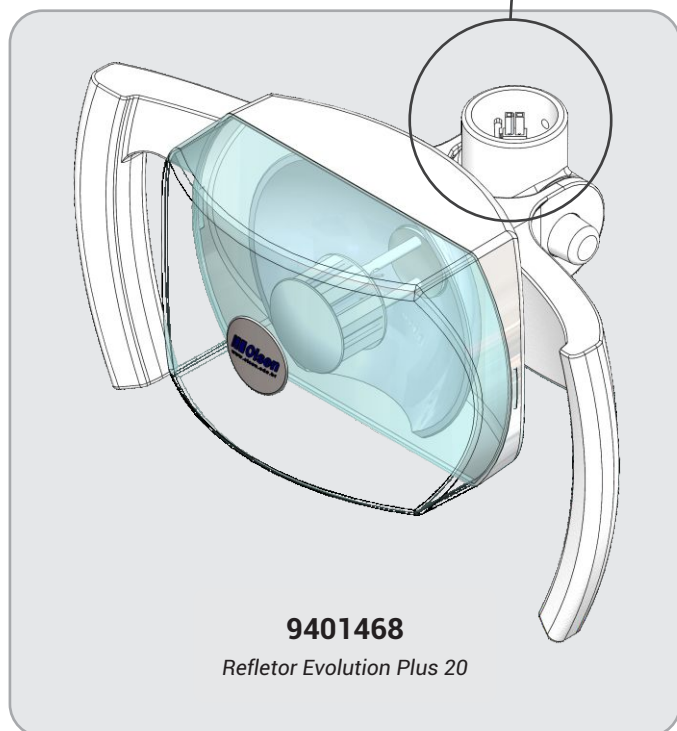


Ao realizar a troca em um modelo antigo, deve também ser solicitado os novos conectores do chicote elétrico, conforme abaixo:

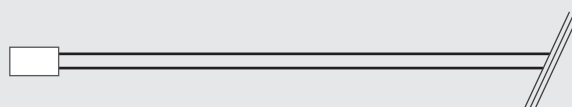

9303035

Chicote Elétrico Refletor Evolution Plus 20


Novo

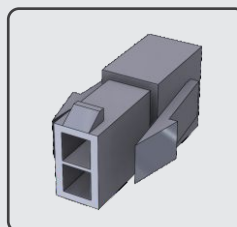

2200962

Conector Mini Fit Fêmea

+

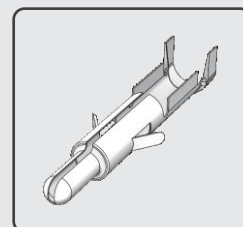

(2x) 2200659

Terminal Mini Fit Macho

Imagens meramente ilustrativas

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Av. Ivo Lucchi, 68, Distrito Industrial
Palhoça/SC - Brasil - CEP 88133-510
Fone: + 55 (48) 2106-6000
www.olsen.odo.br