



## OPCIONAL REGISTRO DE ÁGUA DA CUBA E PORTA COPO


Prezado técnico,

Informamos que, desde o dia 09/05/2022, devido a troca da válvula solenóide Thermoval pela válvula solenóide Emicol, o registro que controla a vazão de água para a cuba e porta copo deixa de ser item de linha. Desta forma, o equipamento terá o registro de água da cuba e porta copo como item opcional.

Esta alteração é válida para os modelos Sprint, Sprint Ambidestro, Sprint Black e Siena que possuem comando de água temporizado. Caso o equipamento não possua o registro de água e haja interesse do cliente em instalar, foram criados os seguintes códigos para sua instalação:

- 979080103** *Kit Registro de Água na Cuba*
- 979080105** *Kit Registro de Água na Cuba (Preto)*
- 979080106** *Kit Registro de Água na Cuba e Copo*
- 979080107** *Kit Registro de Água na Cuba e Copo (Preto)*

### PARA EQUIPAMENTOS COM ÁGUA TEMPORIZADA

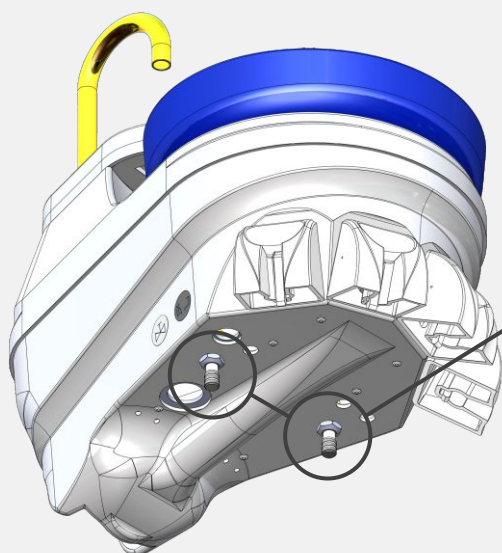


Opcional



**9400077**


*Registro de Água Completo*

### VISTAS LATERAIS

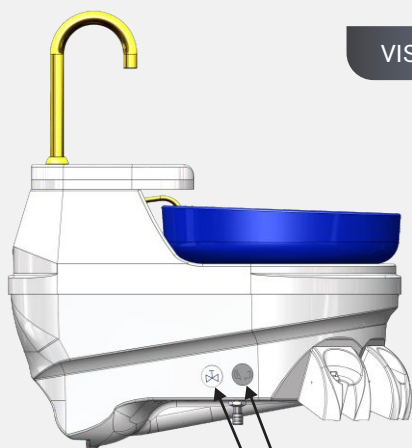

5400120  
5400320

Adesivos - Registro e Água na cuba

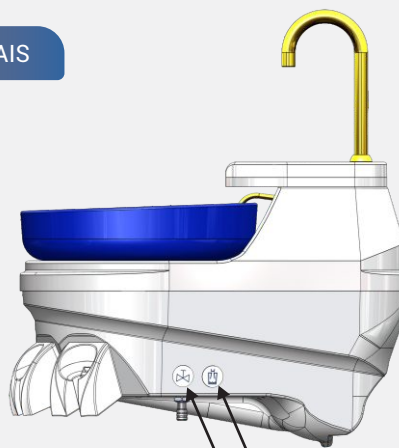

5400126  
5400320

Adesivos - Registro e Água no copo

Imagens meramente ilustrativas

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.  
Av. Ivo Lucchi, 68, Distrito Industrial  
Palhoça/SC - Brasil - CEP 88133-510  
Fone: + 55 (48) 2106-6000  
www.olsen.odo.br